

tetesept:

Anti-Hornhaut 2 in 1 Pflaster

Medizinprodukt


Selbstklebende Pflaster mit Salicylsäure zur Hornhautentfernung und Druckentlastung.

Das tetesept Anti Hornhaut 2 in 1 Pflaster entfernt dank der hautschälenden Wirkung der Salicylsäure die Hornhaut effektiv. Die drei praktischen Pflaster-Größen können passgenau und präzise auf verschiedene Hornhautstellen am Fuß aufgeklebt werden, ohne dabei empfindliche umliegende Haut zu verletzen. Die weiche Polsterung des Pflasters sorgt für Druckentlastung und lindert den Schmerz beim Gehen.

Empfohlene Behandlungsdauer bei normaler Hornhaut: 4 Tage. Sollte sich nach 4 Tagen nicht der erwünschter Erfolg eingestellt haben, kann die Behandlung auf maximal 14 Tage verlängert werden.

Anwendung:

Reinigen und trocknen Sie die betroffene verhornte Stelle auf Ihrem Fuß, bevor Sie das Pflaster anbringen. Wählen Sie die passende Pflastergröße für die verhornte Stelle aus. Lösen Sie das Pflaster vom Trägermaterial ab und kleben Sie es auf die verhornte Stelle auf. Stellen Sie dabei sicher, dass das Pflaster nur auf der Hornhaut und nicht auf Hautstellen ohne Hornhaut aufgebracht wird. Setzen Sie die Anwendung für 4 Tage fort. Wechseln Sie dabei das Pflaster täglich.

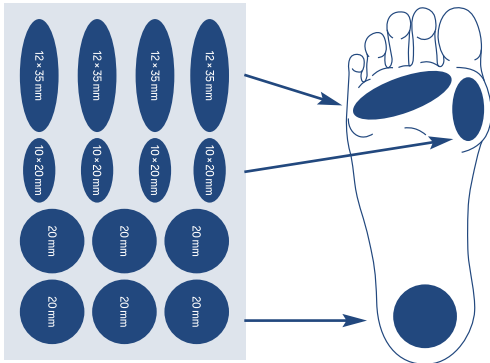

Hinweise:

- Nur zur Anwendung auf Hornhaut.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Nicht auf geröteter oder verletzter Haut anwenden.
- Bei Hautirritationen Anwendung sofort abbrechen.
- Diabetiker, Menschen mit Blutzirkulationsstörungen, schwangere oder stillende Frauen und Kinder unter 16 Jahren sollten vor der Anwendung einen Arzt zu Rate ziehen.
- ☀ ☔ In der Originalverpackung an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Enthält 37 % Salicylsäure.
- Nicht länger als 2 Wochen anwenden, falls nicht anders mit einem Arzt besprochen.
- ☒ Nicht zur Wiederverwendung geeignet.
- Bitte informieren Sie den Hersteller oder die zuständige Behörde (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte; www.bfarm.de), wenn mit dem Medizinprodukt schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten sollten.


Zusammensetzung:

Salicylsäure 37 %

Inhalt:

14 Pflaster

Hersteller:

 EuroSirel S.P.A.
Viale Europa, 30
20047 Cusago (MI) Italy

Vertrieb:


tetesept
pharma gmbh
D-60048 Frankfurt
www.tetesept.de

Überarbeitung

Die Gebrauchsanweisung wurde zuletzt im Oktober 2021 überarbeitet.

Art. Nr. 13270

