

tetesept:

Wund- & Heilsalbe

Bei trockener, wunder, verletzter Haut

Gebrauchsinformation, aufmerksam lesen!

Zusammensetzung:

Olivenöl, Bienenwachs, Sheabutter, Ceramide III, Sojalecithin, Squalan, Triglyceride, Vaseline, Glycerin, Cetylstearylalkohol, Wollwachsalkohole, Stearinsäure, Pentandiol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Carbomer, Ethylen-diamintetraacetat, Xanthan, Zitronensäure, Wasser, Dexpanthenol.

Inhalt und Darreichungsform:

20 g Salbe

Medizinprodukt

Zweckbestimmung:

Die tetesept Wund- & Heilsalbe befeuchtet, pflegt und schützt die trockene, wunde oder verletzte Haut und unterstützt wirksam deren Heilung.

tetesept Wund- & Heilsalbe:

- heilt wunde Stellen und oberflächliche Wunden
- reduziert die Schorfbildung
- schützt vor neuer Schädigung der Haut
- pflegt und regeneriert die gereizte Haut
- und befeuchtet die Haut lang anhaltend.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie tetesept Wund- & Heilsalbe nicht anwenden?

- bei Überempfindlichkeit gegenüber Soja, Erdnuss, Dexpanthenol, Cetylstearylalkohol, Wollwachs oder einen der sonstigen Bestandteile von tetesept Wund- & Heilsalbe.
- bei Kindern unter 6 Jahren

Aufgrund nicht ausreichender Daten wird die Anwendung von tetesept Wund- & Heilsalbe während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Wechselwirkungen:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Mögliche Nebenwirkungen:

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können vor allem Wollwachs und Cetylstearylalkohol in seltenen Fällen allergische Hautreaktionen, wie z.B. Kontaktdermatitis oder allergische Dermatitis mit Juckreiz, Rötung, Ekzem, Ausschlag, Hautreizung und Bläschen oder Pickel hervorrufen.

Sojalecithin kann sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen.

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber Dexpanthenol möglich.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt tetesept Wund- & Heilsalbe nicht anders verordnet hat.

Je nach Bedarf tragen Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren tetesept Wund- & Heilsalbe ein- bis mehrmals täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen auf.

148 mm

175 mm



Wund & Heilsalbe GA 2 → 9444·924·210
RML Typografie GmbH
Schleusenstraße 17·60327 Frankfurt
069-468702·box@rml-ffm.de

Eurokala Schwarz
Pantone Blau 294 C

Stanze/Schnittlinie (druckt nicht!)

MN 65226-AM-37778

Bei Bedarf kann tetesept Wund- und Heilsalbe auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

Wenn sich das Krankheitsbild verschlimmert oder sich die Beschwerden nach einer Woche nicht gebessert haben, sollte ein Arzt oder Apotheker um Rat gefragt werden.

Wichtige Hinweise:

tetesept Wund- & Heilsalbe sollte nicht in die Augen gelangen. Bei Augenkontakt bitte gründlich mit Wasser spülen und, falls Beschwerden auftreten, einen Augenarzt aufsuchen.

Hinweise zur Anwendung und Aufbewahrung:

Das Verfallsdatum dieses Produktes ist auf der Faltschachtel und dem Tubenfalz aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.

Nach Anbruch ist tetesept Wund- & Heilsalbe 6 Monate haltbar.

Nicht über 25°C und trocken lagern.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

 **Hersteller:**
Hälsa Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck

Vertrieb:


tetesept
pharma gmbh
D-60048 Frankfurt
Marschnerstraße 10
D-60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Stand der Information:
2019-11

 **0482**

MN 65226

tetesept Wund- & Heilsalbe dient zur Versorgung von kleinen Verletzungen, wie Kratzern, Schnitt- und Schürfwunden. Die verletzte Haut wird regeneriert. Die hautähnliche Membranstruktur von **tetesept Wund- & Heilsalbe** legt sich schützend auf die Wunde und unterstützt so den natürlichen Heilungsprozess der Haut. Zusätzlich wird durch den bewährten Inhaltsstoff Dexpanthenol die Befeuchtung der Haut gefördert. Die Haut kann sich von innen heraus regenerieren. Durch den schützenden Salbenfilm ergeben sich verbesserte Bedingungen für die Wundheilung. Die natürliche Hautschutzbarriere wird stabilisiert und Reizungen, Rötungen sowie durch Schorfbildung hervorgerufener Juckreiz werden gelindert. Die Haut wird geschützt und anhaltend befeuchtet. Durch eine regelmäßige Anwendung kann Schorf und Narbenbildung reduziert werden.

- Bei trockener, wunder, verletzter Haut
- Regeneriert, befeuchtet, pflegt und schützt
- Verbesserte Wundheilung
- Reduziert Schorf- und Narbenbildung
- Stabilisiert die natürliche Hautschutzbarriere

