

# tetesept:

## Dornwarzen-Pflaster intensiv

### Medizinprodukt

Selbstklebende Wirkstoffpunkte mit Salicyl- und Milchsäure und Druckschutzpflaster zur Schmerzlinderung und örtlichen Behandlung von Dornwarzen.

Durch das Tag und Nacht Konzept wird die Dornwarze wirksam entfernt und die umliegende Haut geschützt. Die Wirkstoffpunkte entfernen durch die hautschälende Wirkung von Salicyl- und Milchsäure die Dornwarze effektiv und gezielt. Die Druckschutzpflaster lindern den Druckschmerz, schützen vor Infektionsausbreitung und bieten sicheren Halt.

### Anwendung:


Die Behandlung erfolgt in 2 Schritten (empfohlene Anwendungsdauer 7–14 Tage).

**Tagsüber:** Tag-Wirkstoffpunkt & Druckschutzpflaster

**Schritt 1:** Morgens entfernen Sie einen Tag-Wirkstoffpunkt vom Trägerpapier und kleben diesen direkt auf die Dornwarze. Wir empfehlen das Aufkleben nach dem Duschen oder einem warmen Fußbad.

**Schritt 2:** Entfernen Sie ein Druckschutzpflaster vom Trägerpapier und fixieren damit den Wirkstoffpunkt auf der betroffenen Stelle. Fest andrücken, damit das Pflaster sicher haftet.

1

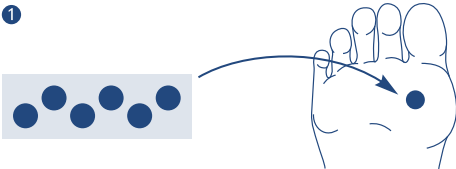


2




### Nachts: Nacht-Wirkstoffpunkt

Entfernen Sie vor dem Schlafengehen das Druckschutzpflaster und den Tag-Wirkstoffpunkt. Kleben Sie einen atmungaktiven Nacht-Wirkstoffpunkt auf die Warze. Heben Sie dafür den Wirkstoffpunkt mithilfe der Aufbring-Hilfe vom transparenten Träger ab, sodass Sie nicht in direkten Kontakt mit dem Wirkstoffpunkt kommen. Kleben Sie den Wirkstoffpunkt auf die Dornwarze auf. Ziehen Sie die Aufbring-Hilfe ab und drücken Sie den Wirkstoffpunkt vorsichtig fest. Entfernen Sie anschließend die blaue Deckfolie vom Wirkstoffpunkt.

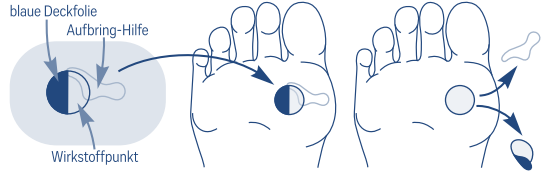

### Hinweise:

- Nur zur Anwendung auf Dornwarzen.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Nicht auf geröteter oder verletzter Haut anwenden.
- Bei Hautirritationen Anwendung sofort abbrechen.
- Diabetiker, Menschen mit Blutzirkulationsstörungen, schwangere oder stillende Frauen und Kinder unter 16 Jahren sollten vor der Anwendung einen Arzt zu Rate ziehen.
-  In der Originalverpackung an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Enthält 35 % Salicylsäure und 2,1% Milchsäure.
- Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 7–14 Tage. Falls die Warze nicht vollständig entfernt wurde, kann der Behandlungszyklus wiederholt werden. Die maximale Anwendungsdauer sollte 12 Wochen nicht überschreiten.
- Bitte informieren Sie den Hersteller oder die zuständige Behörde (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte; [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)), wenn mit dem Medizinprodukt schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten sollten.

**Inhalt:** 2x12 Wirkstoffpunkte, 12 Druckschutzpflaster

**Zusammensetzung:** Salicylsäure 35 %, Milchsäure 2,1 %

### Hersteller:

 Eurosirel S.P.A. Viale Europa, 30 20047 Cusago (MI), Italy

### Vertrieb:



D-60048 Frankfurt  
[www.tetesept.de](http://www.tetesept.de)

### Überarbeitung:

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt im September 2021 überarbeitet.

Art. Nr. 75152

 0051 MN 67242