

Lippenherpes Patch

Zusammensetzung: Hydrokolloidmaterial bestehend aus PU-Verbundmaterial, Natriumcarboxymethylcellulose, medizinischer Kleber.

Darreichungsform und Inhalt:
10 Patches, Durchmesser 15 mm, Medizinprodukt

Zweckbestimmung:
Diskrete Soforthilfe bei Lippenherpes.

Anwendung:



1. Bitte waschen Sie sich vor der Anwendung die Hände. Das Patch sollte auf gereinigter und trockener Haut angewendet werden.
2. Entfernen Sie die eine Hälfte der Schutzfolie und platzieren Sie das Patch auf der betroffenen Hautstelle.
3. Danach ziehen Sie die zweite Hälfte der Folie ab und drücken das Patch leicht an. Fahren Sie vorsichtig mit dem trockenen und sauberen Finger über die Ränder des Patches, um eine vollständige Haftung zu gewährleisten.
4. Anschließend können Sie wie gewohnt Make-up und Lippenstift auftragen.

Hinweise:

Bei Allergien gegen das Patch selbst oder dessen Bestandteile, sollte es nicht angewendet werden. Bei den Sie die Anwendung, wenn Rötungen oder Juckreiz auftreten.

Wann sollte das Patch gewechselt werden?

Das Patch sollte erst gewechselt werden, wenn es beginnt, sich von selbst abzulösen. Durchschnittlich

schützt das Patch ca. 8 Stunden lang. Je nach Auftreten von Wundflüssigkeit kann diese Zeit jedoch variieren. Nach dem Ablösen sollte das Patch durch ein neues ersetzt werden.

Hinweise zur Anwendung und Aufbewahrung:
Das Verfallsdatum dieses Medizinprodukts ist auf der Blisterkarte und der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des Verfallsdatums.
Bitte bei Raumtemperatur, sauber und staubfrei lagern. Kontakt zu korrosivem Gas vermeiden.

Hersteller und Vertrieb:









 Hersteller: HELM MEDICAL GMBH,
Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Germany

 Vertrieb durch:
tetesept Pharma GmbH
60048 Frankfurt
www.tetesept.de
tetesept[®] ist eine eingetragene Marke

Stand der Information: 2016-11

 0297

Bedeutung der Symbole auf der Blisterkarte und dem Pouch:

-  Verwendbar bis
-  Chargenbezeichnung
-  Herstellungsdatum
-  Nur einmal verwenden
-  Hersteller
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Trocken aufbewahren
-  Xxxxxxx